

COSMOPOR E



Descrição

Cosmopor E é uma cobertura estéril auto-adesiva em tecido não tecido, contendo uma compressa absorvente não aderente. Repelente à água.

Composição

Poliéster, Borracha sintética, Viscose, Polietileno e Polipropileno.

Indicação

Cosmopor E é indicado para o tratamento pós-operatório de feridas e também no tratamento estéril de lesões simples. Por exemplo: primeiros socorros; em pacientes com pele sensível.

Instruções de uso

Limpar a pele para diminuir a oleosidade e se necessário, realizar a tricotomia. Retirar a película menor e aplicar na pele, em seguida retirar a película maior.

Tempo de troca

Até a saturação da compressa absorvente, podendo permanecer na ferida por até 48 horas.

Contra Indicação

Não deve ser utilizada em feridas infectadas e altamente exsudativas.

Precauções

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco e com uma temperatura inferior a 30°C e ao abrigo da luz solar direta.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310064

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenua CRF - SP 10.308

Código	Tamanho do Curativo	Quantidade por caixa
900870	7,2 x 5 cm	50
900873	10 x 8 cm	25
900874	15 x 8 cm	25
900876	20 x 10 cm	25
900878	35 x 10 cm	25

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

