


DERMADRY AG

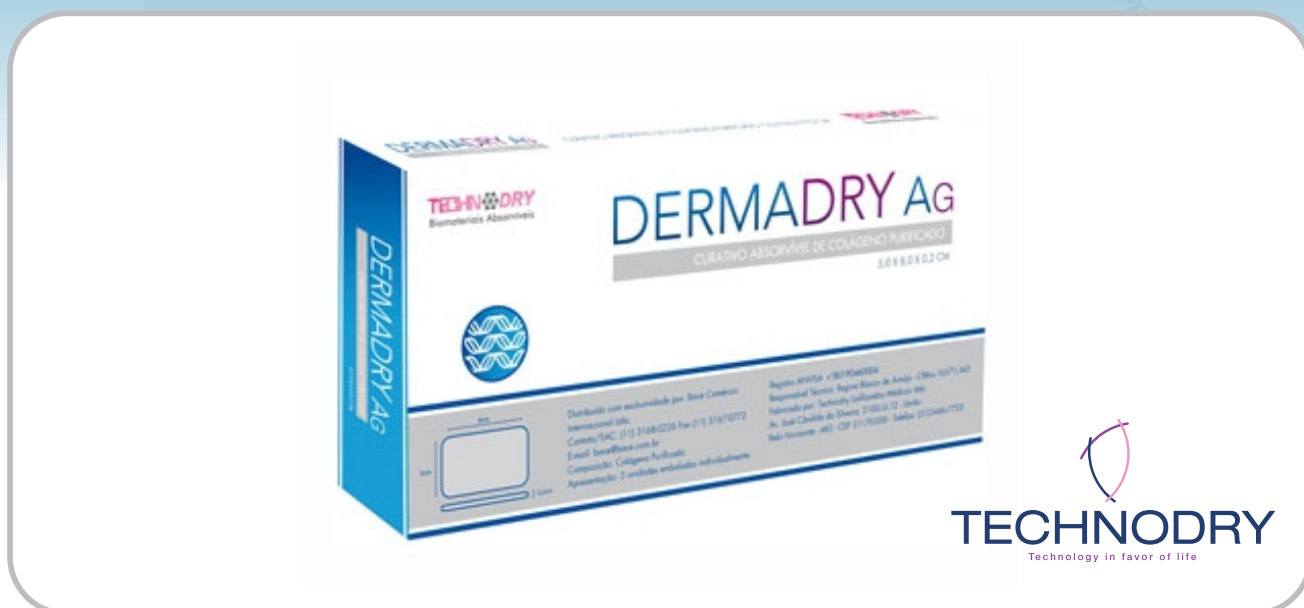

Descrição

Curativo biointegrável estéril de esponja 98% colágeno Tipo 1, além de 1,2% de prata iônica. Auxilia no processo de cicatrização da ferida, promovendo um ambiente (quimiotático) de atração pelos macrófagos onde o seu acúmulo e o responsável pela formação do tecido de granulação.

Indicação

Indicado para feridas que podem estar infectadas ou colonizadas, em qualquer fase do processo de cicatrização.

Composição

Colágeno Tipo 1 e prata.

Apresentações

Tamanho do Curativo	Quantidade por caixa
3 x 5 x 0,2 cm	5
5 x 8 x 0,2 cm	5
10 x 10 x 0,2 cm	5

Curativos embalados individualmente em grau cirúrgico.

Instruções de uso

Lavar a ferida com solução fisiológica 0,9%. Secar a pele ao redor da ferida. Remover o exsudato e tecido desvitalizado, se necessário. Aplicar Dermadry AG, no tamanho que melhor se adequa ao leito da ferida e diretamente sobre esta, excedendo as bordas em +ou - 1cm. Ocluir com cobertura secundária.

Caso necessário irrigar com soro fisiológico para auxiliar na remoção. Feridas secas devem ser irrigadas previamente

com água estéril. Verificar o curativo e a pele circundante frequentemente quanto a sinais de vazamento do exsudato ou sangramento excessivo, evitando assim a maceração da pele.

Tempo de troca

O curativo deverá ser trocado entre 24 e 72 horas, dependendo da capacidade de absorção do organismo.

Precauções

Não utilizar em pacientes com sensibilidade ao material de origem bovina ou a prata. Não deve ser usado para fechamento de incisões cirúrgicas pois pode interferir na cicatrização por ação mecânica ou para implantação cirúrgica.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos

Fabricante: Technodry Liofilizados Médicos LTDA-Brasil

Registro Anvisa: 80190460009

Distribuído por: Bace Comércio Internacional LTFA Farm. Resp.: Tati Guimarães e Oliveira CRF - SP 19.647