

HYDROFILM



Descrição

Hydrofilm é uma película adesiva transparente em poliuretano com adesivo acrilato estéril, semipermeável, à prova de água, que proporciona proteção contra a penetração de bactérias; com adesivo hipoalergênico.

Composição

Poliuretano e adesivo acrilato.

Indicação

Hydrofilm é indicado para a proteção mecânica de áreas recém cicatrizadas, fixação de curativos e proteção da pele e da ferida contra líquidos e microrganismos.

Instruções de uso

Limpar a pele para diminuir a oleosidade e se necessário, realizar a tricotomia. Retirar a película branca seguindo as numerações (1 e 2), aplicar a cobertura e pressionar as bordas adesivas. Em seguida retirar a película de numeração (3 e 4).

Tempo de troca

Deverá ser realizada juntamente com a troca do curativo primário, ou no máximo até 7 dias.

Contra Indicação

Não deve ser aplicado diretamente sobre feridas infectadas, sangrantes ou altamente exsudativas.

Precauções

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco e com uma temperatura inferior a 40°C e ao abrigo da luz solar direta.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	QUANTIDADE POR CAIXA
685756-2 / 685756-4	6 X 7 cm	100
685759-2 / 685759-4	10 X 15 cm	10
685783-2 / 685763-4	10 X 25 cm	25
685762	15 X 20 cm	50
685765	20 X 30 cm	10

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170319005

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

