

HYDROFILM ROLL



Descrição

Hydrofilm Roll é uma película adesiva transparente em poliuretano com adesivo acrilato, semipermeável, à prova de água, que proporciona proteção contra a penetração de bactérias; com adesivo hipoalergênico. Contém planimetria.

Composição

Poliuretano e acrilato.

Indicação

Hydrofilm Roll é indicado para a proteção mecânica de áreas recém cicatrizadas, fixação de curativos e proteção da pele e da ferida contra líquidos e microrganismos.

Instruções de uso

A pele deve estar limpa, seca e livre de pelos. Destacar o lado menor do papel protetor indicado com o número 1, aplicar sobre o curativo primário, remover a parte maior do papel protetor indicado com o número 1, remover a proteção superior indicada pelo número 2. Pressionar gentilmente as bordas para garantir uma boa fixação.

Tempo de troca

Deverá ser realizada juntamente com a troca do curativo primário.

Contra Indicação

Não deve ser aplicado diretamente sobre feridas clinicamente infectadas, sangrantes ou altamente exsudativas.

Precauções

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Não usar em cateteres.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Depois de aberto manter condições de higiene e limpeza no armazenamento.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Produto não estéril

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170319007

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	QUANTIDADE POR CAIXA
685790	5 CM X 10 M	1
685791	10 CM X 2 M	1
685792	10 CM X 10 M	1
685793	15 CM X 10 M	1

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

