

SORBALGON



Descrição

Sorbalgon é uma cobertura de fibras de alginato de cálcio, capaz de proporcionar um ambiente úmido ao no leito da ferida, favorecendo o processo cicatricial.

Composição

Fibras de alginato de cálcio.

Mecanismo de ação

As fibras de alginato do Sorbalgon em contato com os sais de sódio presentes nas secreções da ferida, transformam-se em gel, criando um meio úmido que favorece o processo cicatricial.

Devido às propriedades físicas e químicas das fibras de alginato, a compressa tem um elevado poder de absorção.

Indicação

Sorbalgon é indicado para o tratamento de feridas com exsudato moderado a abundante ou que apresentam sangramento.

Instruções de uso

Aplicar o Sorbalgon na ferida e cobrir a ferida com um curativo secundário.

Tempo de troca

Quando todo o curativo Sorbalgon for transformado em um gel, ele deverá ser trocado.

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Radiação

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310005

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	QUANTIDADE POR CAIXA
999595-7	10 X 10 cm	10
999620-7	10 x 20 cm	10

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

