

# MOLICARE PREMIUM MOBILE



## Descrição

Roupa íntima descartável de formato anatômico que oferece conforto ao usuário em todas as situações. É composta por uma camada externa em não tecido respirável de polipropileno e polietileno, cintura em não tecido com elástico protegido e delicado. A camada intermediária de absorção é composta por celulose e polímero superabsorvente que garante o controle de odor. A terceira camada conta com o exclusivo sistema “Curled Fiber”, que permite a distribuição da urina para a última camada da fralda e garante o valor de PH balanceado 5,5 para manutenção da integridade da pele. A segurança e o conforto são garantidas pelas bordas anti vazamento em formato Z, cobertura em não tecido, macia e elástica na região das pernas. É um produto que garante máxima discrição e pode ser vestido e retirado como uma roupa íntima.

## Indicação

Indicado em casos de incontinência urinária e fecal moderada a severa, especialmente em pacientes ativos.


## Composição

Não tecido de Polipropileno, Filme de Polietileno, Polpa de Celulose, Polímero Superabsorvente (SAP), Curled Fiber.

Tamanho	Código	Tamanho da cintura	Quantidade por pacote	Absorção
M	915832-4	80 a 120 cm	14	1662 ml
G	915833-4	100 a 150 cm	14	1963 ml
GG	915834-4	130 a 170 cm	14	2140 ml

## Instruções de uso

Retirar uma unidade do pacote e vestir como uma roupa íntima.

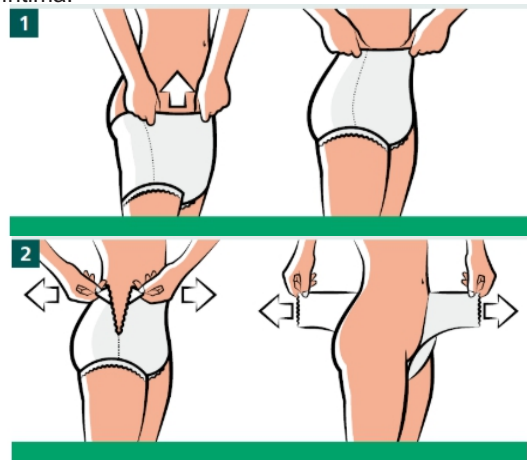

## Precauções

Realizar a troca quando o indicador de saturação desaparecer.

## Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

## Validade: 5 anos

**Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha**

**Fabricante: Paul Hartmann - França**

**Número do Processo Anvisa: 25351.212546/2019-71**

**Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308**

## HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar  
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP  
Telefone: (11) 3168-0226  
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

