

SOL-M™

Máscara N95 para Proteção de Partículas

Projetada para a máxima eficiência na proteção contra microrganismos, partículas e vapores tóxicos.

Eficiência de
filtração de partículas
≥ 95%
e de filtração bacteriana
(BFE) ≥ 98%.



- **Máscara Protetora dobrável:** Sem Válvula, Livre de Látex, Clipe Nasal para ajuste do nariz, Não estéril, 100% Polipropileno;
- **Tecnologia avançada na camada filtrante:** composta por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente e resistentes à umidade da respiração. Oferece desempenho consistente de alta qualidade e filtragem eficaz para melhor êxito na retenção de partículas;
- **Vedação adequada:** material maleável permite o encaixe firme perfeito na face do usuário com a cobertura completa do nariz e boca.
- **Estrutura perfeita:** permite ao usuário inalação e expiração sem dificuldade e abafamento, garante que o ar inalado seja puxado através do meio de filtragem;
- **Clipe nasal revestido com espuma macia e Elásticos de alta resistência para melhor ajuste facial:** facilita a colocação e permite a vedação adequada aos mais diferentes tipos de rostos;



QUANTIDADE	REFERÊNCIAS
50 unidades - Caixa 500 Unidades Caixa de embarque	KN95001H

INSTRUÇÕES DE USO

Devem ser seguidas sempre que o respirador for utilizado.



1. Com as mãos limpas, retirar a máscara da embalagem e inspecionar quanto a danos antes do uso.

2. Com o clipe nasal voltado para fora e para cima, coloque o respirador em uma mão segurando a dobra pelas pontas dos dedos e deixe as tiras pendurar livremente abaixo da mão.

3. Coloque o elástico superior na coroa da cabeça e o elástico inferior na nuca, abaixo das orelhas. Os elásticos não devem ser torcidos.

4. Ajuste a máscara confortavelmente para que ela se ajuste ao seu rosto.

5. Usando as duas mãos, molde o clipe nasal no formato do nariz para garantir um encaixe perfeito e uma boa vedação. Apertar o clipe nasal usando apenas uma mão pode resultar em um desempenho menos eficaz do respirador.

6. Após o uso, retirar tocando apenas nos elásticos e descartar adequadamente.

Vantagens:

Embalagem individual para proteger a máscara contra contaminação antes do uso e durante o armazenamento. Sem Válvula, Não estéril, 100% Polipropileno.

Oferece desempenho consistente de alta qualidade e filtragem eficaz para melhor êxito na retenção de partículas.

Equipamento de proteção individual com uso pretendido para proteger o usuário de partículas no ar e de líquidos que contaminam a face.

Fácil manuseio e colocação, material maleável e confortável que permite o encaixe firme perfeito na face do usuário com a vedação completa do nariz e boca.

Filtro de Poliéster e Polipropileno. Elásticos: Algodão, Poliisopreno e Polipropileno. Clipe Nasal: Plástico e Ferro. Selo Facial: Espuma de PVC leve e resistente.

Estrutura perfeita: permite ao usuário inalação e expiração sem dificuldade e abafamento, garante que o ar inalado seja puxado através do meio de filtragem. Indicada para evitar contaminação e propagação de doenças.

Eficácia de filtragem e resistência a fluidos, impedindo a inalação de micropartículas, eficiência na retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis.

Clipe nasal revestido com espuma macia e Elásticos de alta resistência para melhor ajuste facial: facilita a colocação e permite a vedação adequada aos mais diferentes tipos de rostos.

Tecnologia avançada na camada filtrante: composta por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente e resistentes à respiração.

Possui amplo uso em unidades de saúde, podendo também ser utilizada em indústrias alimentícias, restaurantes, hotéis, etc.

Dobra Plana: perfeita para facilidade de armazenamento e transporte.

Máscara não estéril: uso único e descartável.



ATENÇÃO

• O usuário deve descartar a máscara quando observar: presença de sujidade visível, queda do clipe nasal, dificuldade respiratória e quando o estirante não tiver mais elasticidade;

• Armazenar sempre na embalagem original, em lugar sem umidade, em temperatura ambiente.

A SOL-Millennium™

É uma empresa com presença global.

Especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde, pacientes e colaboradores que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco de acidentes com perfurocortantes. A empresa possui presença global, com sede em 7 países e 35 anos no mercado mundial. Nossa missão é a construção de um amanhã mais saudável e seguro para os profissionais da saúde.

São Paulo

Rua Alvorada, 1289, Cj 1004/1005
Vila Olímpia, São Paulo/SP
Tel: 55 11 3044 1183
Email: vendas02@sol-m.com

Ribeirão Preto

Rua Raphael Andreolli, 850
Distrito Empresarial Prof. Luiz Roberto Jabali
Tel: 55 16 3442 1454
Email: vendas@sol-m.com



SOL-MILLENNIUM®
Building a Healthier Tomorrow